

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用  
作業専用  
IHIアグリテック用

|     |                 |                  |                      |      |
|-----|-----------------|------------------|----------------------|------|
| お客様 | 名称              | 製造番号             | 点検実施日                | ご承認印 |
|     | 住所              | 運転回数             | 点検実施者                |      |
|     | 納入場所            | サービス形態           | モリタ担当部署              |      |
|     | 新潟県新潟市東区 5-5-12 | 14710014<br>2160 | 2019.06.14<br>モリタ 新島 |      |
|     |                 | ダブルパック           | モリタ担当部署<br>新島        |      |

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ポンプチューブの潰れ・濡れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、濡れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 給水弁の作動状態・濡れ
- 給湯弁の作動状態・濡れ
- RO水弁の作動状態・濡れ
- 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- 凝縮期の取り付け状態・濡れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・濡れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- SDカードの書き込み確認

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

|      |   |
|------|---|
| 運転確認 |   |
| 合    | 否 |

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

| 交換部品 (名称・型式)                             | 数量 |
|--|----|
| 扉パッキン L=500                              | 1  |
| 扉パッキン L=1500                             | 1  |
| HEPAフィルター                                | 1  |
| 入口フィルター                                  | 1  |
| DPI 42-ア                                 | 2  |
| ◎ 中程ラックのゴムブッシュのヘタリ、洗浄アームの回正、排水口フィルターの清掃。 |    |
| ゴムブッシュを取り付け後は正常回転に回りました。                 |    |

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ  
 〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL:086-944-6528

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用  
作業専用  
IHIアグリテック用

|     |      |               |        |          |         |               |      |  |
|-----|------|---------------|--------|----------|---------|---------------|------|--|
| お客様 | 名称   | 相澤歯科医院        | 製造番号   | 14060099 | 点検実施日   | 2019.06.14    | ご承認印 |  |
|     | 住所   | 新潟市西區小野5-5-12 | 運転回数   | 4056     | 点検実施者   | エムシーサービス 磯貝 薫 |      |  |
|     | 納入場所 |               | サービス形態 | ダブルベ-ミック | モリタ担当部署 | モリタ製作部        |      |  |

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
  - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
  - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - フック取付け状態・動作確認
  - フックパネ-フック蝶番ピンの取り付け状態
  - ビス・ナット・ホ-ローセット増し締め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット動作確認
  - ドアロックユニット動作確認
  - 蓋板のキズ・汚れ
  - 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- 縦カゴの破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- 圧ジェターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達速度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 不部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

正面右のドアカバーもろし。

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エア-フィルターのみ取り・汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケ-ターによる判定
- サークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケ-タ貼り付け

運転確認

○ 合   否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

| 交換部品 (名称・型式) | 数量 |
|--------------|----|
| ドアパッキン       | 1  |
|              |    |
|              |    |
|              |    |
|              |    |

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030