

IM-302

## クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様用

お客様 名稱 住所 納入場所	ゆきじに大和病院 新潟県南魚沼市御所町415 新潟外環線	製造番号 M051510030 100071 運転回数 サービス形態	点検実施日 2019.8.28 点検実施者 工場 モリタ 担当者 長瀬一介	ご承認印
-------------------------	------------------------------------	---	---	------

## 計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーロー・セット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ

## 缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

## 配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの締み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ リセット
- エアーフィルターのつまり・汚れ /17回

## 性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認	
<input checked="" type="checkbox"/> 合 <input type="checkbox"/> 否	

インジケータ貼り付け

BMS-Test STEAM

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6526

FAX:086-942-9030