

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100161
作業年月日	平成 28 年3月9日		作業時間: 1 Hr
顧客名	アワセ第一医院		TEL: 098-937-5536
所在地	沖縄県沖縄市泡瀬2丁目54-26		担当 丑番 様
販売店	琉球光和		担当 新里 様
納入年月日	平成 22年 11月24日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 535
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

給水が少し遅いようお気をつけ。

装置 情報	交換後運転回数: 423	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 271	殺菌+7L: 1920
	リークチェック: 2083	自己洗浄: 1633	7Lアルコール単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
吸盤		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2016 年 3 月 9 日

ご署名 城 間

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者