

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100410
作業年月日	平成 27 年9月17日		作業時間: 1 Hr
顧客名	中央外科		TEL: 098-937-5536
所在地	名護市城1-1-12		担当 様
販売店	琉球光和		担当 新里 様
納入年月日	平成 24年 8月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年目 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ パルス数 628
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 300	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 43	殺菌+7L: 1101
	リークチェック: 1132	自己洗浄: 564	7Lアルコール単独: 17	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	オゾンセンサー		レ	1
吸盤 3入		レ	1				
オゾン水濃度計フィルター		レ	1			☐	
オゾン水濃度計		レ	1			☐	
排水栓		レ	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 9 月 17 日

ご署名

仲村 孝二

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者