

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様用

お客様	名称	みずほ資料 岡山県立中央図書館	製造番号	100411	ご確認	田
	住所	新潟県長岡市中島1909-15	納入日	2019.12.4		
	TEL	0258-86-7785	納入検査実施者	エム・サービス株式会社 新井 誠		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	☐	開閉動作確認	外装・設置	☐	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	☐	ドアパッキンキズ・汚れ点検		☐	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	キズ・汚れ	
	☐	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		☐	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	☐	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	☐	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	☐	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	☐	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	☐	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		☐	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	☐	洗剤投入量の確認		☐	ラック仕様切換(ハント・ビースラック・標準ラック)	
	☐	ローラーポンプの動作確認		☐	温水使用切換	
給排水	☐	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	有	☐	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	☐	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	評価	☐	周波数と設置ICWの一致	
	☐	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)	その他	☐	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	☐	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		☐	運転・お手入れ方法の説明	
	☐	給湯温度(45~50℃)		☐	装置内運転時異音・振動	
電装系	☐	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒	良好	トシ 12/4
	☐	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐	不良	
	☐	電源スイッチの作動状態				
	☐	SDカードの挿入・取外性				
	☐	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				
特記事項						
取扱い説明は本年 10月院前に完了となりました。						