

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号 : 100161
作業年月日	平成 29 年2月27日			作業時間 : 1 Hr
顧客名	アヲセ第一医院			TEL : 098-937-5536
所在地	沖縄県沖縄市泡瀬2丁目54-26			担当 丑番 様
販売店	琉球光和			担当 新里 様
納入年月日	平成 22年 11月24日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常 パルス数 409
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常 履歴 0.18 ppm
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
給水が少し遅いような気がする

装置情報	交換後運転回数 :	304	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌 :	288	殺菌+7L :	2208
	リークチェック :	2289	自己洗浄 :	21917	7L単独 :	1	エア単独 :
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		リ	1	殺菌槽コネクタ		リ	2
吸盤		リ	1	オゾンセンサー		リ	1
オゾン水濃度計7L用		リ	1			リ	
オゾン水濃度計		リ	1			リ	
排水栓		リ	1			リ	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017 年 2 月 27 日

ご署名  印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者