

保守点検・修理 報告書

発行日 平成年月日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100216
作業年月日	平成27年7月2日		作業時間:	Hr
顧客名	大北内科胃腸科クリニック		TEL:	0980-53-5455
所在地	名護市大北3丁目1-48		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	照屋栄太 様
納入年月日	平成23年4月5日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ ハルス数 303
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1214	更新(リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 1456	殺菌+アル: 3101
	リークチェック: 28	自己洗浄: 1035	アルコール単独: 300	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		コネクター継手(コネクター側)		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒				☐	
コネクター継手(本体側)		☒				☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 7 月 2 日

ご署名

照屋 栄太

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者