

保守点検・修理 報告書

発行日 平成年月日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100466
作業年月日	平成28年7月6日	作業時間:	Hr
顧客名	岩下クリニック	TEL:	098-982-6666
所在地	うるま市安慶名511番地コホ YONAHARA II 1F	担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成24年12月日	保証期間	内口外口
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 505
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 3067	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 30	殺菌+アル: 642
	リークチェック: 610	自己洗浄: 494	アルコール単独: 1	エア単独: 28

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		コネクター継手(コネクター側)		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒				☐	
コネクター継手(本体側)		☒				☐	
オゾンセンサ校正(交換)		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	2017年7月6日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 西頭美幸	印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者