

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300699	
作業年月日	平成28年12月21日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	なかむら内科おなかクリニック		TEL:	098-930-3377	
所在地	沖縄県沖縄市比屋根6丁目27番17号1F		担当	様	
販売店	中央医療器		担当	上原 様	
納入年月日	平成 27年 12月 1日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数: 560
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 591	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 180	殺菌+アル: 411
	リークチェック: 565	自己洗浄: 102	アルコール単独: 10	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	メインコネクター		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
分解触媒		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城