

# 点検・修理報告書

管理 No. 19204  
発行日: 2020年3月5日

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                                                    |
| 作業年月日                | 2020年3月3日 作業時間: 8 Hr                                                                                                               |
| 顧客名                  | とさかデンタルクリニック 様 TEL:                                                                                                                |
| 所在地                  | 新潟県燕市井土巻2-237 ご担当 様                                                                                                                |
| 販売店                  | 株式会社モリタ新潟営業所 ご担当 様                                                                                                                 |
| 納入年月日                | 2017 年 5 月 8 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                      |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |
| 出張・引取                | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                               |              |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                                          | 製造番号: 100252 | 運転回数: 1677回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                               |              |             |
| ・エラー26 停電異常が発生した。                                             |              |             |
| 原因                                                            |              |             |
| ・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。                                     |              |             |
| ・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。 |              |             |
| 処置、作業内容                                                       |              |             |
| ・サーキットプロテクタを新品交換しました。                                         |              |             |
| 特記事項                                                          |              |             |

|   | 交換部品名称     | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|------------|-------------|--------|----|----|
| 1 | サーキットプロテクタ |             | 2      |    |    |
| 2 |            |             |        |    |    |
| 3 |            |             |        |    |    |
| 4 |            |             |        |    |    |
| 5 |            |             |        |    |    |
| 6 |            |             |        |    |    |
| 7 |            |             |        |    |    |
|   |            | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |            |             | 技 術 料  |    |    |
|   |            |             | 出 張 料  |    |    |
|   |            |             | 合 計    |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2 年 3 月 25 日

ご署名 登坂 祐介



修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 富田        | 三宅        |
| '20/03/05 | '20/03/05 | '20/03/05 |