

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 平成29年6月9日

|       |                               |                                                            |       |                                    |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000           |                                                            | 製造番号: | 100218                             |
| 作業年月日 | 平成 29年 6月 9日                  |                                                            | 作業時間: | Hr                                 |
| 顧客名   | 中部協同病院                        |                                                            | TEL:  | 0980-52-1001                       |
| 所在地   |                               |                                                            | 担当    | 様                                  |
| 販売店   | (株)中央医療器                      |                                                            | 担当    | 上原 様                               |
| 納入年月日 | 平成 年 月 日                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品   |                                    |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                              | 年 回目  | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |       |                                    |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 482 |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm         |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                     |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |              |                |           |            |
|----------|--------------|----------------|-----------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 30  | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌: 83    | 殺菌+7L: 219 |
|          | リークチェック: 263 | 自己洗浄: 117      | 7Lコル単独: 2 | エア単独: 2    |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称          | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------------|-------|-------------------------------------|----|-----------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクター継手(コネクター側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度校正(交換)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| コネクター継手(本体側)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー校正(交換) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |                 |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017 年 6 月 9 日

ご署名 東恩公 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店  
沖縄県浦添市仲間 1-19-6  
TEL: 098-876-4262

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       |     |