

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 29 年 6 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100280
作業年月日	平成 29 年 6 月 22 日		作業時間	1 Hr
顧客名	あがりえクリニック		TEL	0980-43-0271
所在地	沖縄県名護市大東 1 丁目 5-34		担当	様
販売店	琉球光和		担当	新里 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目	定期点検シート記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
11-742-7 コネクタ - Oリング劣化			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 542
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 269 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数	51	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌	10	殺菌+アル	286
	リークチェック	289	自己洗浄	190	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1	オゾン分解触媒		☒	1
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	
水フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2017 年 6 月 22 日	ご署名 木岡 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
木岡	玉城