

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 171016

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 沖縄支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	たまきクリニック 様	機番	100033
環営	所在地	沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭 837-8	納入日	平成22年4月14日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成29年7月26日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成29年9月28日

修理依頼・不具合内容

各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。下記のとおりご報告いたします。

〔1〕点検結果

- ・オゾンガス、酸素ガス、排オゾンガス系統・・・異常ありませんでした
- ・給水、オゾン水系統・・・異常ありませんでした
- ・排気・排水系統・・・汚れ、劣化部分がありましたので部品交換しました。
- ・電装部品・・・タッチパネルを交換しました（操作方法は同じです）

写真：交換部品一式



〔2〕作業内容

- 1：分解点検および部品交換
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.66ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：運転情報・・・交換後運転回数：157 殺菌：2477 殺菌＋アルコール：3985
リークチェック：3903 自己洗浄：1643 アル単独：218 17単独：1

承認



審査



作成

H29.10.16

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1台	
	配管チューブ、パッキン	1式	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIシパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528