

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	大通り歯科クリニック 様	製造番号	100048	点検実施日	2020年10月12日	ご承認印	
	住所	新潟県新潟市南区大通黄金3-1-1	運転回数	2233	点検実施者	IAT 佐藤		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者			

ドア機能

- ☐ ドア開閉動作
- ☐ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☐ ドア締め付けスイッチの作動
- ☐ インターロックの作動
- ☐ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☐ ドアパネルの取付け・キズ
- ☐ ドアヒンジの動作
- ☐ ドア手動開放レバーの作動
- ☐ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☐ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☐ ローラーポンプの作動
- ☐ 薬剤投入量
- ☐ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取付け
- ☐ 乾燥ファンの作動・異音
- ☐ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☐ 乾燥ヒータの作動
- ☐ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☐ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☐ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☐ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☐ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☐ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☐ 給水弁の作動・漏れ
- ☐ 給湯弁の作動・漏れ
- ☐ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☐ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☐ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☐ 循環ポンプの作動・異音
- ☐ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☐ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☐ 排水ポンプの作動・異音
- ☐ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☐ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☐ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☐ 槽内LEDの点灯
- ☐ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☐ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☐ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☐ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示
- ☐ 電源スイッチの作動
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☐ メモリーカードへの書き込み確認
- ☐ 圧力センサーの取付け
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☐ 外装の汚れ・損傷
- ☐ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

性能評価

- ☐ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1セット
プレフィルター	1個
HEPAフィルター	1個
洗剤・仕上げ剤ポンプチューブ	1セット

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030