

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 30年 7月 11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100033
作業年月日	平成 30年6月 25 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	たまきクリニック		TEL:	098-926-1313
所在地	沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭 8 3 7 - 8		担当	金澤 様
販売店	I-EM`イナル		担当	城間 様
納入年月日	平成22年 4月 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	5回目	定期点検ソール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス後オゾン濃度がなくなり代替え器入れ替え

事務所に持ち帰り、通常水が逆流しない所に水が入り

水を取り除き試運転して通常に戻ったので入れ替えを行いました。

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数:230
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0, 67 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 835	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌: 2669	殺菌+アル: 4471
	リークチェック: 4378	自己洗浄: 2006	アルコール単独: 219	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	メインコネクタ		<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
排水フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店  
 沖縄県浦添市仲間 1 - 1 9 - 6  
 TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城