

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成30年9月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100636
作業年月日	平成30年9月11日		作業時間: 1 Hr
顧客名	おやかわりニク		TEL: 098-893-5511
所在地	沖縄県宜野湾市長田1丁目29-1		担当 屋比久 様
販売店	中央医療器		担当 宮城松広 様
納入年月日	平成 25年6月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 4年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 レ		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ガン生成異常が連続で出る エアーパージ不良			
不具合原因、作業内容			
定期交換部品と酸素流量調整、 E7の電磁弁SV12・SV8・SV9を交換			
点検項目			
フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 621	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 14	殺菌+アル: 3320
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1371	アルコール単独: 1	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1	接続コネクタ		レ	2
オゾンセンサー		レ	1				
フィルター		レ	1				
吸盤		レ	1				

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	澤山 美智子 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城