

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成30 年 9月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号: 100410
作業年月日	平成 30 年9月20日				作業時間: 1 Hr
顧客名	中央外科				TEL: 098-937-5536
所在地	名護市城1-1-12				担当
販売店	琉球光和				担当 新里 様
納入年月日	平成 24年 8月 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検	レ	総合点検	□	定期点検シール記入
出張・引取	修理	□	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
次回内部ホース交換したほうがいい

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロツク	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	362	更新 (リプレイス) 実施	未実施	殺菌: 100	殺菌+7L: 2193
	リークチェック:	2291	自己洗浄:	1173	7L単独: 33	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	オゾンセンサ		レ	1
吸盤		レ	1				
オゾン水濃度計7L用		レ	1				
オゾン水濃度計		レ	1				
排水栓		レ	1				

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者	新鋭工業株式会社 沖縄支店	責任技術者	玉城
沖縄県浦添市仲間1-19-6		TEL: 098-876-4262	