

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号：300322
作業年月日	平成 30年 10 月23 日				作業時間： Hr
顧客名	かなな病院				TEL：
所在地					担当 榎本師長 様
販売店					担当 様
納入年月日	平成 26年 9 月 25日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検	シ	総合点検	□	年 回目
出張・引取	修 理	□	定期点検シール記入 ☒		
					修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロツク	正常	シ	殺菌槽 LED	正常	シ
酸素ライソ	正常	シ	エアライソ	正常	シ
アルコールライソ	正常	シ	オゾン水濃度計動作	正常	シ
オゾンセンサ	正常	シ	排水栓、排水ライソ	正常	シ
給水ライソ	正常	シ	細管送水ライソ	正常	シ
濃度計流量	正常	シ	排気ライソ	正常	シ
水位センサー	正常	シ	オゾン濃度	正常	シ
水漏れ確認	正常	シ	異常音、振動	正常	シ
清掃	正常	シ	電源コード	正常	シ
トレー	正常	シ	殺菌チューブ類	正常	シ
殺菌槽コネクタ	正常	シ		正常	□
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					
排水パイプの交換が必要					

装置情報	交換後運転回数：	173	更新 (リセット)	実施	・未実施	殺菌：	150	殺菌+7L：	511
	リークチェック：	493	自己洗浄	187		7L単独：	0	エア単独：	0
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称		部品コード	交換	数量	
オゾン分解触媒		シ	1				□		
排水栓		シ	1				□		
オゾン濃度校正 (交換)		シ	1				□		
オゾンレギュ校正 (交換)		シ	1				□		
お客様ご確認署名欄									
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。									
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。									
ご署名 11月 20日						印			

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL：098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城