

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年5月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100216
作業年月日	2019 年5 月16日		作業時間: 1 Hr
顧客名	大北内科胃腸科クリニック		TEL:
所在地	名護市大北3丁目1-48		担当 宮里 様
販売店	中央医療器		担当 大塚 様
納入年月日	2011年 4月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
排水エラーで点検と定期点検			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 レ	殺菌槽 LED	正常 レ
酸素ライン	正常 レ	エアライン	正常 レ
アルコールライン	正常 レ	オゾン水濃度計動作	正常 レ 8° 回数
オゾンセンサ	正常 レ	排水栓、排水ライン	正常 レ
給水ライン	正常 レ	細管送水ライン	正常 レ
濃度計流量	正常 レ	排気ライン	正常 レ
水位センサー	正常 レ	オゾン濃度	正常 レ 履歴 0, ppm
水漏れ確認	正常 レ	異常音、振動	正常 レ
清掃	正常 レ 清掃 レ	電源コード	正常 レ
トレイ	正常 レ	殺菌チューブ類	正常 レ
殺菌槽コネクタ	正常 レ		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1422	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 839	殺菌+アル: 3002
	リークチェック: 6	自己洗浄: 832	アルコール単独: 44	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	コネクタ継手		レ	2
分解触媒		レ	1			☐	
オゾンセンサー		レ	1			☐	
フィルター		レ	1			☐	
吸盤		レ	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者 作業者

玉城