

保守点検・修理 報告書

2019年5月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	301159
作業年月日	2019年5月14日		作業時間:	Hr
顧客名	きんクリニック		TEL:	098-968-2145
所在地	金武町金武94		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	大塚 様
納入年月日	平成20年 5月 11 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 668
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 76	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 4	殺菌+アル: 157
	リークチェック: 307	自己洗浄: 80	アルコール単独: 156	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
ポン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手(本体側)		☒	2			☐	
ポンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 小谷 由貴 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城