

中澤 様

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1

発行日 2019年7月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300098
作業年月日	2019 年 7 月 29 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	高橋クリニック		TEL:	098-851-1971
所在地	豊見城市与根8-15		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	井上 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルが表示しない。

不具合原因、作業内容

タッチパネル交換済み

タッチパネルOED-1000用に変更

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 243
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1556 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 11089	殺菌+7L: 1907
	リークチェック: 2863 自己洗浄: 1248	7Lコル単独: 5	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ-継手 (コネクタ側)		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクタ-継手 (本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサ校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 7 月 29 日

ご署名

座喜味夏希

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

