

中澤様

保守点検・修理 報告書

発行日 2019年7月3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300323
作業年月日	2019 年 7 月 3 日		作業時間:	3 Hr
顧客名	なかよし内科		TEL:	098-887-3333
所在地	那覇市真嘉比2-29-28		担当	国吉 様
販売店	沖縄三和メディカル		担当	仲里 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

「消毒+アルコール」運転中に「消毒」運転に変わって(ま)

不具合原因、作業内容

コントロール基板 交換
タッチパネル 交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 541
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 996	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 775	殺菌+アル: 2096
	リークチェック: 2092	自己洗浄: 1169	アルコール単独: 10	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	コネクター継手(コネクター側)		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
ワゴン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
コネクター継手(本体側)		☒	1			☐	
ワゴンセンサー校正(交換)		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R1 年 7 月 12 日

ご署名

国吉

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

