

中澤 様 保守点検・修理 報告書

発行日 2019年7月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100286
作業年月日	2019 年 7 月 26 日		作業時間:	Hr
顧客名	仲地胃腸科内科		TEL:	098-866-3232
所在地	那覇市泊2-6-10		担当	様
販売店	沖縄三和メディカル		担当	仲里 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 506
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1166

装置情報	交換後運転回数: 1887 更新(リプレイ)実施・未実施	殺菌: 1887	殺菌+7L: 349
	リークチェック: 4639	自己洗浄: 1547	7Lコ-ル単独: 20
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ-継手 (コネクタ側)		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクタ-継手 (本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 26 日

ご署名 高橋 久美子

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

