

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 平成31年2月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	301352
作業年月日	平成 31年2 月27日		作業時間:	Hr
顧客名	恩納クリニック		TEL:	098-966-8115
所在地	沖縄県国頭郡恩納村恩納6329		担当	様
販売店	琉球光和		担当	新里 様
納入年月日	平成 30年 2 月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検ソール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 399
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 610	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 186	殺菌+7L: 424
	リークチェック: 0	自己洗浄: 230	アルコール単独: 5	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒	2			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者