

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼
番号

08-14634

No. 191004

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 沖縄支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	きなクリニック 様	機番	100080
環営	所在地	沖縄県那覇市首里宜保 1-26-3	納入日	2010年09月30日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2019年04月05日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2019年09月27日

修理依頼・不具合内容

水槽からの水漏れ

不具合原因 (故障箇所) と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。


[1] 点検結果

水槽に微小な亀裂が発生しており、そこから水が漏れることを確認しました。
この部品の他に、劣化した部品を交換して復旧いたしました。
なお、定期保守点検も併せて実施いたしました。

写真1：水槽、タッチパネル



写真2：定期交換部品、パッキン、アルコールキャップ

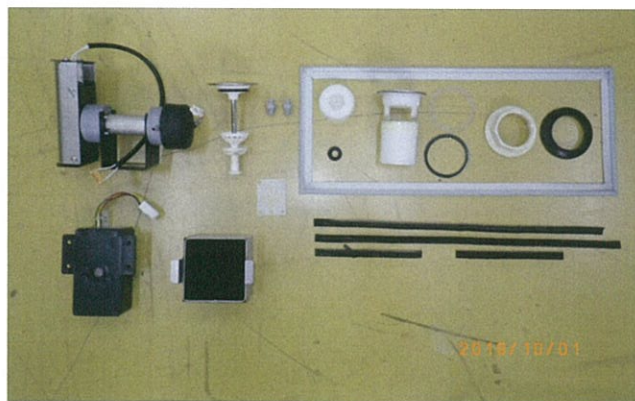

[2] 作業内容

- 1：部品交換
- 2：酸素流量 再調整：0.75→0.89 L/min
- 3：給水電磁弁入口側清掃：砂状の物がストレーナに付着していました
- 4：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 5：運転確認・・・正常

承認
若 19.10.4 井
審査
中 19.10.4 澤
作成
R01.10.4 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	水槽、タッチパネル	1式	
2	定期交換部品	1式	
3	パッキン、上部カバーパッキン	1式	今回無償
4	アルコールキャップ、ドレンASSY；水槽側	1式	今回無償

(株) IHI アグリテック (旧社名：IHI シパウラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528