

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1

発行日 2019年 5月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300120
作業年月日	平成29年 5月 26日		作業時間:	Hr
顧客名	おおにし医院		TEL:	0980-52-2279
所在地	名護市城2丁目10-16		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	大塚 様
納入年月日	2014 年 3 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 1 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED 正常
酸素ライン	正常	レ	エアライン 正常
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作 正常
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン 正常
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン 正常
濃度計流量	正常	レ	排気ライン 正常
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度 正常
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動 正常
清掃	正常	レ	電源コード 正常
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類 正常
殺菌槽コネクタ	正常	レ	正常
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	357	更新(リセト)実施・未実施	殺菌:	7	殺菌+アル:	1448
	リークチェック:	1119	自己洗浄:	821	アルコール単独:	2	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	コネクタ継手(コネクタ側)		レ	1
排水栓		レ	1			□	
オゾン濃度校正(交換)		レ	1			□	
コネクタ継手(本体側)		レ	1			□	
オゾンセンサ校正(交換)		レ	1			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 読谷山 乃々之 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城