

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和2年3月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100301
作業年月日	令和 2 年 3 月 17 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	島袋内科・胃腸科		TEL:	098-886-7085
所在地	那覇市首里鳥堀町4-7		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	田村 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

※ シリコンホース交換 済み, その他異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 286
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

※ モニター モリワ

装置 情報	交換後運転回数: 271	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 736	殺菌+アル: 2074
	リークチェック: 2794	自己洗浄: 1753	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 (コネクター側)		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
コネクター継手 (本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 3 月 17 日

ご署名

島袋隆志



修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

