

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 12月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300662
作業年月日	平成 ²⁹ 年 12月 17日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	つかざんクリニック		TEL:
所在地	沖縄県南風原町津嘉山1315-1		担当 様
販売店	沖縄三和メディカル		担当 金 ^{めい} 様
納入年月日	2015年 8月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

シリンホース交換済

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 370
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

カラー液晶 確認済

装置 情報	交換後運転回数: 718	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 11	殺菌+7L: 1521
	リークチェック: 2	自己洗浄: 3	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒				☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒				☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 17 日

ご署名 比嘉 梢子 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

