

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年9月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号: 100636
作業年月日	2019年 9 月19日				作業時間: 1 Hr
顧客名	おやかわクリニック				TEL: 098-893-5511
所在地	沖縄県宜野湾市長田1丁目29-1				担当 屋比久 様
販売店	中央医療器				担当 宮城松広 様
納入年月日	平成 25年6月 26日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理	シ	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		
フタロック	☒ 正常	殺菌槽 LED ☒ 正常
酸素ライオン	☒ 正常	エアライオン ☒ 正常
アルコールライオン	☒ 正常	オゾン水濃度計動作 ☒ 正常 バイ数: 739
オゾンセンサー	☒ 正常	排水栓、排水ライオン ☒ 正常
給水ライオン	☒ 正常	細管送水ライオン ☒ 正常
濃度計流量	☒ 正常	排気ライオン ☒ 正常
水位センサー	☒ 正常	オゾン濃度 ☒ 正常 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	☒ 正常	異常音、振動 ☒ 正常
清掃	☒ 正常	電源コード ☒ 正常
トレー	☒ 正常	殺菌チューブ類 ☒ 正常
殺菌槽コネクタ	☒ 正常	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 587	更新 (リセッ): ☒ 実施・未実施	殺菌: 15	殺菌+7L: 3907
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1651	7L-1L単独: 1	エア単独: 8

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1	接続コネクタ		レ	2
オゾンセンサー		レ	1				
フイルター		レ	1				
吸盤		レ	1				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 澤 山

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店

沖縄県浦添市仲間1-19-6

TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城