

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2020年8月24日

|       |                                                                    |                                                            |           |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S                                               |                                                            | 製造番号:     | 301352                              |
| 作業年月日 | 2020年8月24日                                                         |                                                            | 作業時間:     | Hr                                  |
| 顧客名   | 恩納クリニック                                                            |                                                            | TEL:      | 098-966-8115                        |
| 所在地   | 沖縄県国頭郡恩納村恩納6329                                                    |                                                            | 担当        | 様                                   |
| 販売店   | 琉球光和                                                               |                                                            | 担当        | 新里 様                                |
| 納入年月日 | 平成 30年 2 月 19 日                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品       |                                     |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 1 回目 |                                                            | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                       |                                                            | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |   |           |    |              |
|----------|----|---|-----------|----|--------------|
| フタロック    | 正常 | レ | 殺菌槽 LED   | 正常 | レ            |
| 酸素ライン    | 正常 | レ | エアライン     | 正常 | レ            |
| アルコールライン | 正常 | レ | オゾン水濃度計動作 | 正常 | レ パル数 614    |
| オゾンセンサ   | 正常 | レ | 排水栓、排水ライン | 正常 | レ            |
| 給水ライン    | 正常 | レ | 細管送水ライン   | 正常 | レ            |
| 濃度計流量    | 正常 | レ | 排気ライン     | 正常 | レ            |
| 水位センサー   | 正常 | レ | オゾン濃度     | 正常 | レ 履歴 977 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | レ | 異常音、振動    | 正常 | レ            |
| 清掃       | 正常 | レ | 電源コード     | 正常 | レ            |
| トレー      | 正常 | レ | 殺菌チューブ類   | 正常 | レ            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | レ |           | 正常 | レ            |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |     |                 |     |          |        |       |
|----------|----------|-----|-----------------|-----|----------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 891 | 更新(リセット) 実施・未実施 | 殺菌: | 729      | 殺菌+7L: | 772   |
|          | リークチェック: | 0   | 自己洗浄:           | 467 | アルコール単独: | 5      | エア単独: |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|--------------------------|----|---------------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | レ                        | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | レ                        | 1  |               |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度校正(交換)  |       | レ                        | 1  |               |       | <input type="checkbox"/> |    |
| コネクタ継手(本体側)  |       | <input type="checkbox"/> |    |               |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサ校正(交換) |       | レ                        | 1  |               |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

田中

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店  
 沖縄県浦添市仲間1-19-6  
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城