

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和2年11月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100303
作業年月日	令和 2 年 11 月 11 日	作業時間:	Hr
顧客名	平田胃腸科内科	TEL:	098-888-0070
所在地	那覇市銘苅3-22-33R8ビル1F	担当	銘苅 様
販売店	(株)中央医療器	担当	宮城 様
納入年月日	平成 23 年 11 月 4 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 590
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

。ツリコンホース交換済み。給水スロットル交換済み

装置情報	交換後運転回数: 1388	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 8067	殺菌+7L: 4823
	リークチェック: 10799	自己洗浄: 2205	アルコール単独: 182	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手(本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 11 日

ご署名 銘苅 弓美

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者 作業者

