

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2020年7月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	301160
作業年月日	2020年7月1日		作業時間:	1 Hr
顧客名	てるや内科胃腸科		TEL:	0980-88-1616
所在地	沖縄県石垣市字新川127-3		担当	様
販売店	中央医療器		担当	田村 様
納入年月日	平成29年5月23日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数: 423
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

オゾン水パイプ交換

装置 情報	交換後運転回数： 719	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌： 367	殺菌＋7L： 1574
	リークチェック： 1949	自己洗浄： 1130	アルコール単独： 30	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	メインコネクタ		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
分解触媒		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 狩俣 夏枝 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城