

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2020年 6月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 301358
作業年月日	2020年 6月 2日		作業時間: 1 Hr
顧客名	読谷診療所		TEL: 098-895-1900
所在地	北谷町上勢頭556-3		担当 様
販売店	中央医療器		担当 宮城松広 様
納入年月日	18年 1月	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
なし

点検項目					
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	清掃	レ	
トレー	正常	レ	電源コード	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
				正常	□

パルス数

360

履歴

268

ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 55	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 3	殺菌+アル: 109
	リークチェック: 111	自己洗浄: 92	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1			□	
オゾンセンサー		レ	1			□	
フィルター		レ	1			□	
吸盤		レ	3			□	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 宮里 印
--	------------------------

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城