

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2020年 5月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300120
作業年月日	2020年 5月 28日		作業時間:	Hr
顧客名	おおにし医院		TEL:	0980-52-2279
所在地	名護市城2丁目10-16		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	井上 様
納入年月日	2014 年 3 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☐
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
液晶表示基盤交換			
不具合原因、作業内容			
表示ができない			
定期メンテ			
点検項目			
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED 正常 レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン 正常 レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作 正常 レ ハルス数288
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン 正常 レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン 正常 レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン 正常 レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度 正常 レ 履歴 0.68ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動 正常 レ
清掃	正常	レ	電源コード 正常 レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類 正常 レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 8	殺菌+アル: 1448
	リークチェック: 1119	自己洗浄: 822	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		レ	1
排水栓		レ	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		レ	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		レ	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		レ	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 鈴木 鈴美 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者