

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2020年5月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100216
作業年月日	2020年5月14日		作業時間: 1 Hr
顧客名	大北内科胃腸科クリニック		TEL:
所在地	名護市大北3丁目1-48		担当 宮里 様
販売店	中央医療器		担当 井上 様
納入年月日	2011年 4月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
排水エラーで点検と定期点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 レ	殺菌槽 LED 正常 レ
酸素ライン 正常 レ	エアライン 正常 レ
アルコールライン 正常 レ	オゾン水濃度計動作 正常 レ パルス数: 521
オゾンセンサ 正常 レ	排水栓、排水ライン 正常 レ
給水ライン 正常 レ	細管送水ライン 正常 レ
濃度計流量 正常 レ	排気ライン 正常 レ
水位センサー 正常 レ	オゾン濃度 正常 レ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 レ	異常音、振動 正常 レ
清掃 正常 レ 清掃 レ	電源コード 正常 レ
トレー 正常 レ	殺菌チューブ類 正常 レ
殺菌槽コネクタ 正常 レ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 1342	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 901	殺菌+7L: 4342
	リークチェック: 6	自己洗浄: 1107	7L単独: 46	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	コネクタ継手		レ	2
分解触媒		レ	1			☐	
オゾンセンサー		レ	1			☐	
フィルター		レ	1			☐	
吸盤		レ	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
b	玉城