

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2020年 7月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100177
作業年月日	2020 年 7 月 27 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	前田胃腸科医院		TEL:	098-832-4889
所在地	那覇市三原2丁目15-12		担当	様
販売店	(株)琉球光和		担当	新里 様
納入年月日	2011 年 4 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 329
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
シリコンホース交換済み、カーボン			

装置 情報	交換後運転回数: 1084	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 5667	殺菌+アル: 4145
	リークチェック: 9	自己洗浄: 713	アルコール単独: 260	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	/
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	/			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒	/			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄		2020年 7 月 27 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	