

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2020年9月2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100344
作業年月日	2020 年 9 月 2 日		作業時間:	Hr
顧客名	沖縄セントラル病院		TEL:	098-854-5511
所在地	那覇市与儀 1-26-6		担当	花城 様
販売店	(株)エコ・エンジニアリング		担当	本部 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・シリコンホース異常なし
・給水フィルター、お客様にて交換済み

不具合原因、作業内容

・なし

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 580
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 270 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・正常、終了

装置 情報	交換後運転回数: 529	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 2177	殺菌+7L: 2015
	リークチェック: 1742	自己洗浄: 5198	7L単独: 54	エア単独: 51

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手(本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 2 日

ご署名 花城 亨

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者 作業者

