

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2020年 10月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100302
作業年月日	2020 年10月30日		作業時間: 1 Hr
顧客名	潮平病院		TEL: 098-937-2054
所在地	沖縄県沖縄市胡屋1丁目17-1		担当 様
販売店	アクティヴ		担当 喜瀬 様
納入年月日	平成23年 10月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 レ		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

リークチェックコネクタ-0112かみわりの蓋交換必要

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ パルス数 374
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 187	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 473	殺菌+アル: 896
	リークチェック: 1324	自己洗浄: 0	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		レ	1	吸盤		レ	3
オゾンセンサー		レ	1	洗浄コネクタチューブ側		レ	2
オゾン分解触媒		レ	1	洗浄コネクタ本体側		レ	2
濃度計フィルター		レ	1			☐	
排水栓		レ	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

山城 哲男

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城