

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
III-4用

お客様	名称	製造番号	点検実施日	承認印
	住所	運転回数	点検実施者	
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署	
	様			

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン (2本) ◎	1本
ホースコネクタ (DPI42-7) ◎	2本
化油器用ホースアッシー ◎	1本
タイロッドアッシー ◎	1本
(前回点検後 1126回使用)	
運転回数 3290回	

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030



宅急便センター様



宅急便

便(発払)

20 DNP

品番902



「宅急便センター受け取りサービス」ご利用時のお願い

お届け先に宅急便センターの「センターコード」・「センター名」をご記入ください。
※電話番号・氏名は受取人様をご記入ください。※営業日・時間を確認してから、お受け取り日・時間帯をご希望ください。

ご希望の方は、お届け
お受け取り時間帯に
チェックをして下さい。

ご依頼主様

携帯電話・PHSより
ナビダイヤル
0570-200-000

固定電話より
フリーダイヤル
0120-01-9625

050 IP電話より
ビジネスダイヤル
050-3786-3333

ヤマト運輸株式会社
本社 03(3541)3425
東京都中央区銀座2丁目16番10号

交通事情等により
ご希望のお届け日・
お届け時間帯に添
えない場合もあり
ますので予めご了承
下さい。



宅急便の責任限度
額は30万円です。ま
た危険品、偽造・贋
物及び有価証券の品
目のお取扱いはで
きません。なお、そ
の他は宅急便約款
によります。

TO 郵便番号 704-8122

電話 TEL 086 944 6510

住所・Receiver's address (宅急便センターコード・センター名)
岡山県岡山市東区西大寺新地
170-6 株式会社H1物流産業
システム部 杉本様
氏名・Receiver's name 小山様

FROM 郵便番号 950-0872

電話 TEL 025 275 8347

住所・Sender's address (宅急便センターコード・センター名)
新潟県新潟市 東区
牡丹山3-14-32
氏名・Sender's name 上田サービス(株) 新潟サービスセンター様

お問い合わせ
送り状番号 4574-8664-3121

お届け先
(お受け取り) 希望日 10月8日
ご希望時間帯

品名 (ワレモノ・なまもの)・Contents (Fragile・Perishable)
品名はできるだけ詳しくご記入ください。※宅急便で現金は送付できません。

相澤歯科医院 様宛 郵局
WD-150

ゴルフ・スキー・空港 クラブ本数

集荷・持込	現収・現取	電子マネー・KM割・精算カード・ホ	宅急便センター 受け取りサービス
サイズ 60 80 100 120 140 160	運賃	料金	冷凍 冷蔵

発店コード 040 321 合計 (税込)

お客様コード 0252758347-000 (001)

受付日 年 10 月 7 日

お届け予定日 月 日

上記の金額を正に領収致しました。
本書をもって領収書にかえることがあります。 運送料一万円未満



a 4 5 7 4 8 6 6 4 3 1 2 1 a

クロネコメンバーズに登録すると、
受け取る・送るが便利になります

ヤマト運輸 検索

お荷物のお問い合わせは
ヤマト運輸ホームページへ