

保守点検・修理 報告書

2021年8月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S plusB		製造番号:	500207
作業年月日	2021年8月23日		作業時間:	Hr
顧客名	仲宗根クリニック		TEL:	
所在地	沖縄市高原7-23-14		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	上原 様
納入年月日	2019 年 2 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	3 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	☐

バルブ数: 1081

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 2221	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 5/48	殺菌+アル: 2177
	リークチェック: 3	自己洗浄: 709	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	コネクター継手 (コネクター側)		☒	0
排水栓		☒	1	7K3.1.2-1		☒	1
ポン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクター継手 (本体側)		☒	0			☐	
ポンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城