修理報告書(引取り修理)

修 理 依 賴番号

No. 151222

					根田力				
配布 约客先	<u>先</u> 1	納入先	(株)新鋭工業福岡	沖縄支店 殿		機	種		ONW-10
環営	1	所在地	沖縄県宮古島市平良東	[仲宗根添189	8-7	機	番	;	000578
環品		ューサ゛ー名	宮古島リハビリ温泉病院 様		納	入日		平成 17 年 9 月 27 日	
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受	付 日		平成 27 年 9 月 25 日
計	3	返送先	納入先と同じ			発	送 日		平成 27 年 11 月 9 日

修理依頼・異常内容


オーバーホール (PSA⇒酸素ボンベ仕様変更含む)

不具合原因(故障箇所)と処置予定

[1] 点検結果(不具合箇所と不具合原因)

エラー6(PSA異常)は再現しました。PSA(酸素発生装置)に関する部品を全部交換して酸素ボンベで動く仕様に変更し、併せて劣化した部品を全部交換しました。

番号1~5: PSA部品(取外し)

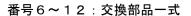





[2] 修理・点検内容

- 1. 部品交換・・下表と写真をご参照ください。
- 2. オゾン水濃度測定:0.41~0.54mg/L··正常
- 3. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

承 認	交 換 部 品								
	番号	部品名称	数量	備 考					
	1 ~ 5	PSA⇒酸素ボンベ仕様変更部品	1式						
審 査	6	配管チューブ、パッキン	1式						
— н н	7	オゾンセンサー	1台						
	8	水位レベルセンサー	3本						
	9~11	水ポンプ (P-1、P-2、P-3)	3台						
作 成	1 2	給水電磁弁	2個						
H27. 12. 22	1 3	排水バルブ(駆動用抵抗含む)	1式						
中澤	1 4	オゾン発生装置	1式						