

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和3年12月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100303	
作業年月日	令和 3 年 12 月 17 日		作業時間:	1.5 Hr	
顧客名	平田胃腸科内科		TEL:	098-888-0070	
所在地	那覇市銘苅3-22-33R8ビルF		担当	銘苅 様	
販売店	(株)中央医療器		担当	宮城 様	
納入年月日	平成 23 年 11 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
定期部品交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 705
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
給水バルブ交換済み			

装置 情報	交換後運転回数: 1189	更新 (4セット) 実施・未実施	殺菌: 6682	殺菌+アル: 5597
	リークチェック: 11987	自己洗浄: 2546	アルコール単独: 193	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2021 年 12 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	銘苅 弘美	印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	