

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和3年5月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300867
作業年月日	令和 3 年 5 月 2 / 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	いらはクリニック		TEL:	098-859-5566
所在地	那覇市田原 1-9-2		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	井上 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検完了。給水正常。

装置情報	交換後運転回数: 1643	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 1081	殺菌+7L: 1561
	リークチェック: 2502	自己洗浄: 177	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手(本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 2 / 日

ご署名 大浦 未来 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	