

保守点

報告書

管理 No.

発行日 2021年6月11日

販売名	オ ン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号:	300699
作業年月日	2021年 6月11日	作業時間:	1 Hr
顧客名	なかむら内科おなかクリニック	TEL:	098-930-3377
所在地	沖縄県沖縄市比屋根6丁目27番17号1F	担当	大西 様
販売店	中央医療器	担当	上原 様
納入年月日	平成 27年 12月 1日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数: 500
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 968 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

~~給水フィルタ交換~~

排水フィルタは配管直接接続

装置 情報	交換後運転回数: 958	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 1742	殺菌+7L: 2800
	リークチェック: 4444	自己洗浄: 937	アルコール単独: 107	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1			☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
分解触媒		☒	1			☐	
排水フィルタ		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

大西 寛子

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城