

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211102
発行日：2021年 11 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 S ■		製造番号：	301080
作業年月日	令和 3 年 10 月 22 日		作業時間：	Hr
顧客名	叶クリニック 様		TEL：	098-886-0888
所在地	那覇市首里石嶺町4-9-1		ご担当	様
販売店			ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ■ 総合点検 ■ 年 回目 定期点検シール記入 ■			
引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 ■			

不具合状況、依頼内容	
中古医療機器販売前の点検整備	
不具合原因、作業内容	
保守点検を含めて整備しました。	
点検項目	
フタロック 正常 ■	殺菌槽 LED 正常 ■
酸素ライン 正常 ■	エアライン 正常 ■
アルコールライン 正常 ■	オゾン水濃度計動作 正常 ■ パルス数 865
オゾンセンサ 正常 ■	排水栓、排水ライン 正常 ■
給水ライン 正常 ■	細管送水ライン 正常 ■
濃度計流量 正常 ■	排気ライン 正常 ■
水位センサー 正常 ■	オゾン濃度 正常 ■ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ■	異常音、振動 正常 ■
清掃 正常 ■ 清掃 ■	電源コード 正常 ■
トレー 正常 ■	殺菌チューブ類 正常 □
殺菌槽コネクタ 正常 ■	マニホールド周辺チューブ 正常 ■
□	運転プログラムバージョン 正常 ■ Ver. 0209/T05C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数：882→0	更新（リセット）実施	殺菌/消毒：1506	殺菌/消毒+アル：2193
	リークチェック：0	自己洗浄：179	アルコール単独：25	エア単独：148

交換部品名称	No/コード	交換	数量	交換部品名称	No/コード	交換	数量
定期交換部品		■	1 式	取説、簡易取説、CD		■	1 式
オゾン水濃度計	18093305			給水ホース、ストレーナ		■	1 式
オゾンセンサー	181001-001M1			排水ホース		■	1 式
オゾン分解触媒				トレー ASSY		■	1 式
排水栓、脱気フィルタ				フタ、フタパッキン		■	1 式
コネクタ(水槽/チューブ)				基板、ドレンバルブ ASSY	LED3V型	■	1 式


機械出荷日：2021年10月22日

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	宮宗

1:定期交換部品


オゾン水濃度計、オゾンセンサー、触媒、脱気フィルタ、排水栓、コネクタ

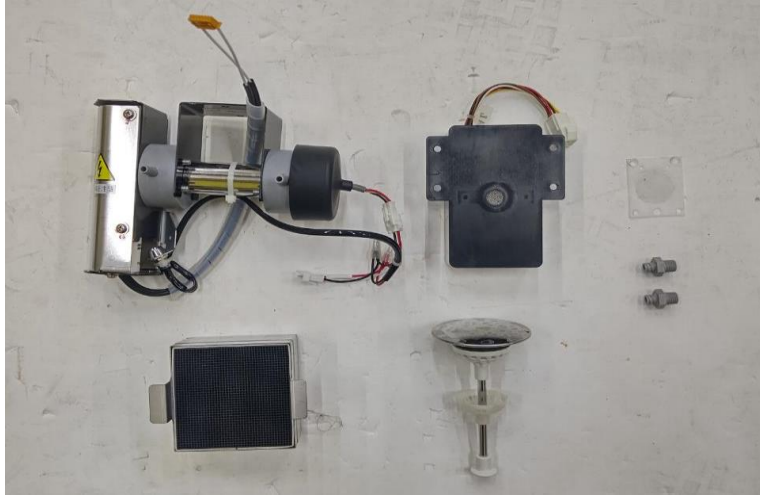


2:排水ホース



3:トレイASSY

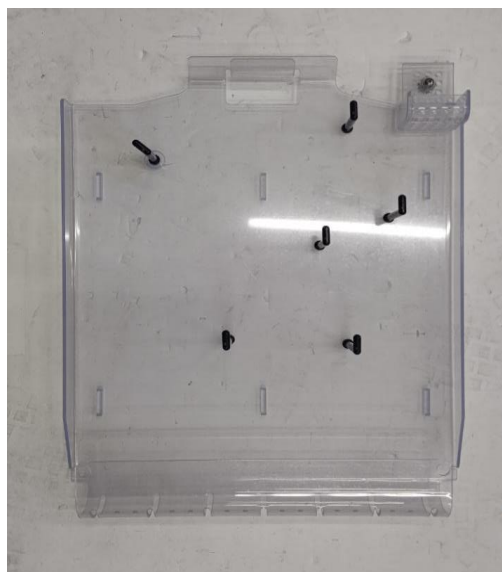

4:コントロール基板、フタ、フタパッキン

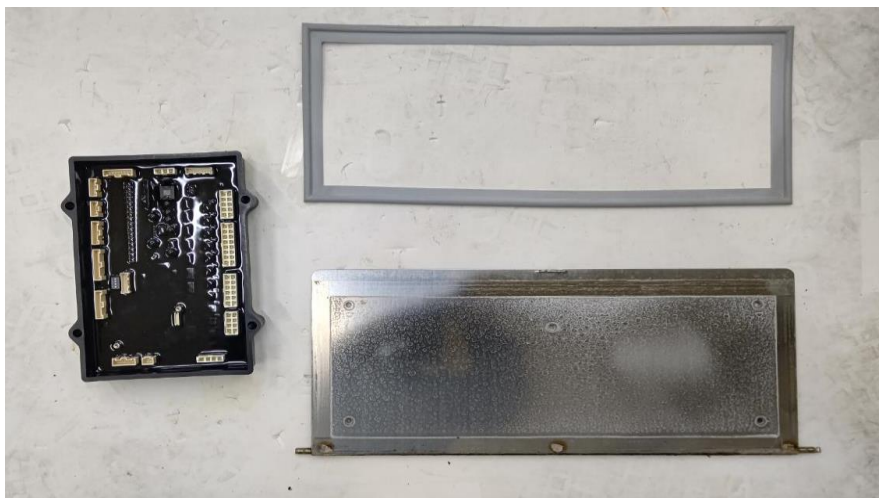

5:ドレンバルブASSY



6:取扱説明書 欠品につき写真なし

7:簡易取説 欠品につき写真なし

8:顧客管理システムCD-ROM 欠品につき写真なし

9:給水ホース 欠品につき写真なし

10:ストレーナ 欠品につき写真なし