

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和 3年 12月 27日

|       |                                                                               |           |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           | 製造番号:     | 300626                                                |
| 作業年月日 | 令和 3年 12月 27日                                                                 | 作業時間:     | 1.0 Hr                                                |
| 顧客名   | つかざんクリニック                                                                     | TEL:      |                                                       |
| 所在地   | 南風原町字津嘉山1315-1                                                                | 担当        | 様                                                     |
| 販売店   | 沖縄三和メディカル                                                                     | 担当        | 様                                                     |
| 納入年月日 | 平成 27 年 8 月 31 日                                                              | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 1 回目 | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                              |

|                           |                                                                    |           |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |           |                                                    |
| 定期メンテナンス                  |                                                                    |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |           |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |           |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 762    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |           |                                                    |
| 異常なし                      |                                                                    |           |                                                    |

|          |              |                  |            |             |
|----------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 472 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 17     | 殺菌+7L: 2803 |
|          | リークチェック: 53  | 自己洗浄: 83         | アルコール単独: 0 | エア単独: 5     |

| 交換部品名称         | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称           | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|----------------|-------|-------------------------------------|----|------------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクター継手 (コネクター側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                  |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度校正 (交換)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                  |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| コネクター継手 (本体側)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                  |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー校正 (交換) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                  |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 27 日

ご署名

平良さやか

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店  
沖縄県浦添市仲間 1-19-6  
TEL: 098-876-4262

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                   |
|       |  |