

クリニックさいとう 御中

ONW-10 作業報告書 (機番000345)

作業日: H.21年 6月30日

作業員: IHI シバウラ 中澤-裕

内容: 水洩れ (機体左下側より水洩)

状況: 6/30 の3回 ユーザ様 運転して水洩れはなかった。

6/30 2回運転して水洩れはなかった。

作業内容: 水槽亀裂, 配管緩みなし

大気開放配管 2系統閉塞

洗淨コネクタ (ゴム製) のチューブを 抜けないように
バンドで固定

アスピレーターチューブ 交換, トレージ1本 取付

運転回数 CNT99 = 1068

CNT90 = 1432 (リセット実施)

結果 上記作業後 2回 運転しましたが
水洩れは ありませんでした。

(ご署名)

クリニックさいとう

