

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 畑村

点検年月日	2008年 7 月 11 日	機種名	ONW-10	製造機番	000852
設置場所	伊勢市宮町1-18 うにた医院 内視鏡室			TEL	0596-25-0161
納入時期	H17 年 10 月 7 日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	90.6~91.4 流量を小さくすると90%以上は生成した	
酸素発生	正常	☐	濃度:	% 流量: 0.93 L/min 圧力: 0.103~0.175 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☒ 洗浄済清掃、75%アルコール部分は洗浄済
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	770736とVer10に交換 吸着筒 SPS-0414
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名

印