

点検確認書 (2/2)

洗浄終了後表示が「0」

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

でなく「14」になる。

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成21年 6 月 11 日	機種名	ONW-10	製造機番	001104
設置場所	1F検査室 右側設置			TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間	2286回	御対応者	山田さん

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐ 未実施	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒ 6回				
酸素発生	正常	☐ 濃度：	%	流量：	L/min	圧力：MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☐	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	終了後に水槽ヤホースに水が残っているため「18」を点滅して排水運転を始めます。これが終わると「14」になります。ただ今回は6回でも正常でした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
運転プログラム交換	一式	
Ver 8 → Ver 10		

12回運転するとフィルターが点滅して
掃除の時期でお知らせします。

21年 6月 11日

ご署名 大沼 玲子

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。