

2010年1月14日

川瀬医院 御中

株式会社IHIシバウラ
環境事業部
営業・メンテナンス部
メンテナンスグループ
宮 下

作 業 報 告 書

場 所：愛知県春日井市若草道2-3-2

作 業 日：2010年1月13日

製造機番：001218

作業内容：定期点検契約

＊点検項目順に点検作業の実施（作業時間2.5h）

＊定期交換部品の交換作業（交換部品）

- ・吸着筒
- ・吸湿筒
- ・ドレン用フィルタ
- ・オゾン分解触媒

＊性能確認

オゾン水濃度 0.5mg/L（規格値0.3mg/L）

発生酸素 濃度：94.0%（規格値90%以上）

流量：0.80L/min（規格範囲値0.73～0.82L/min）

圧力：0.175～0.105MPa

コメント：不具合もなく動作良好。

以 上

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部営業メンテナンス

点検担当者: IHIシバウラ 宮



点検年月日	2010/1/13	機種名	ONW-10	製造機番	1218
設置場所				TEL	
納入時期	2007 年 3 月	使用時間		御対応者	前田 様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
発生酸素	正常	☒	濃度: 94.0%	流量: 0.80 L/min 圧力: 0.175~0.105 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H22 年 1 月 13 日

御署名

前田 誠司